

Lex-Bal

Balón

Intragástrico



The IntraGastricBalloon

reduces food intake and thus leads to weight loss.



Intragastric Balloon

Lex-Bal

Modelo
400-800 cm³

El Balón Intragástrico reduce la ingesta de alimentos y, por tanto, conduce a la pérdida de peso.

El fundamento de este procedimiento es que la presencia de un balón inflado con líquido en el interior del estómago, que crea una sensación de saciedad, reduce el consumo de alimentos y, por tanto, conduce a la pérdida de peso.

El balón, fabricado en caucho de silicona, un material biocompatible de eficacia probada, se introduce por vía endoscópica a través de la boca, mientras el paciente se encuentra bajo sedación, y se rellena con suero fisiológico hasta un volumen que oscila entre los 400 y 800 cm³, según el tipo de paciente que se esté tratando.

El Balón debe ser retirado después de 12 meses y puede ser sustituido por uno nuevo, si el médico lo considera necesario.



VENTAJAS




15-45 MINUTOS
PROCEDIMIENTO
AMBULATORIO



HASTA 12
MESES DE
PERMANENCIA



VOLUMEN
400- 800 CM³

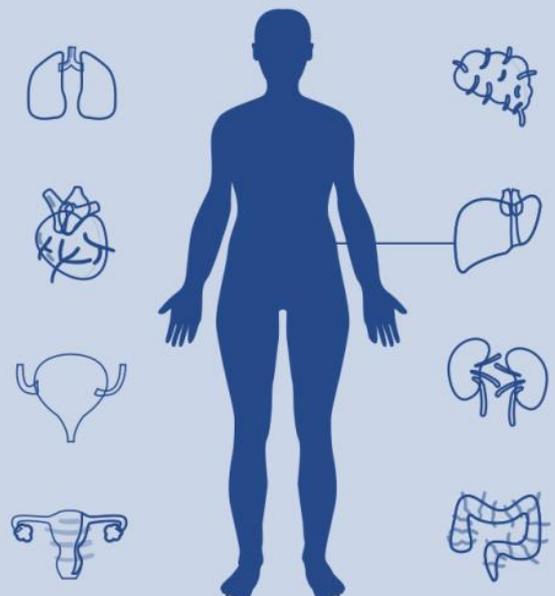



Intragastric Balloon

Lex-Bal

Modelo
400-800 cm³

INSTALACION Y RETIRO

- 1** Inserción endoscópica a través de la boca
- 2** En su interior, se rellena con suero fisiológico hasta un volumen que oscila entre los 400 y 800 cm³, según el tipo de paciente que se trate.
- 3** El Balón debe ser retirado a los 12 meses y puede ser sustituido por uno nuevo.
- 4** El Balón se retira por vía endoscópica a través de la boca.

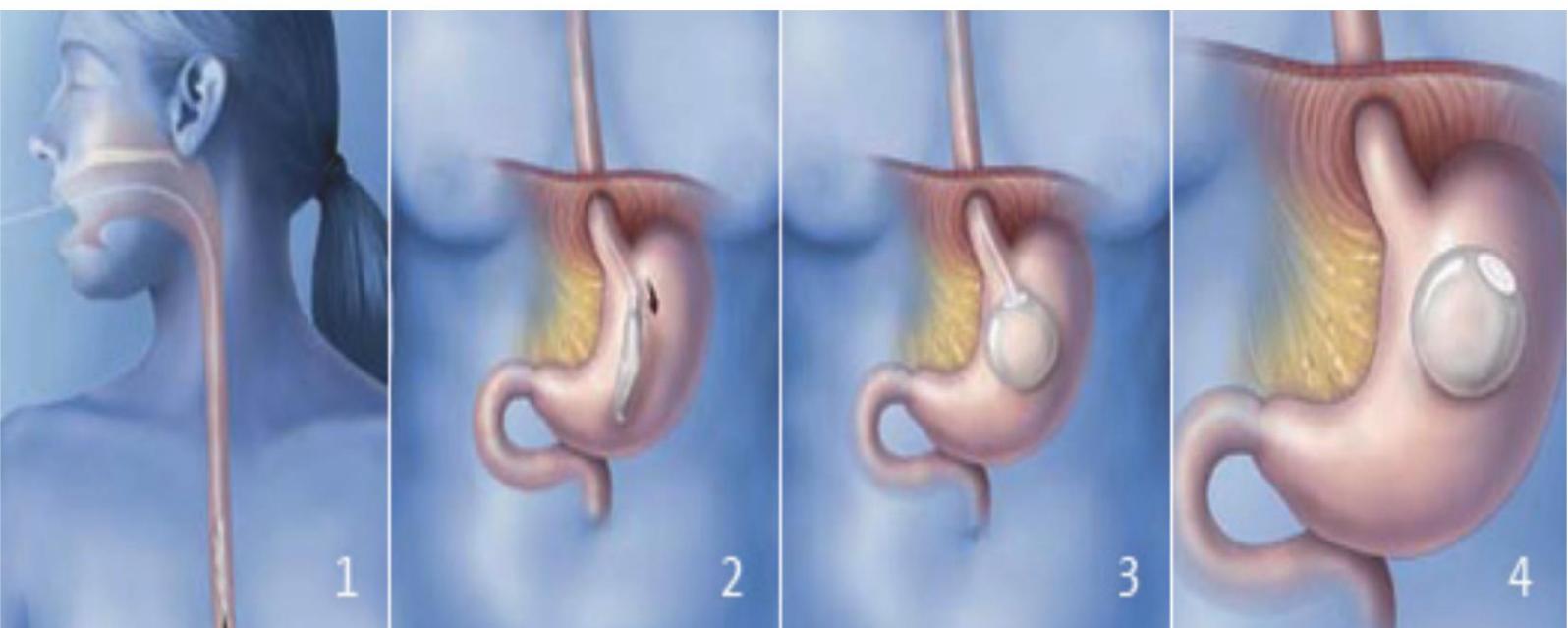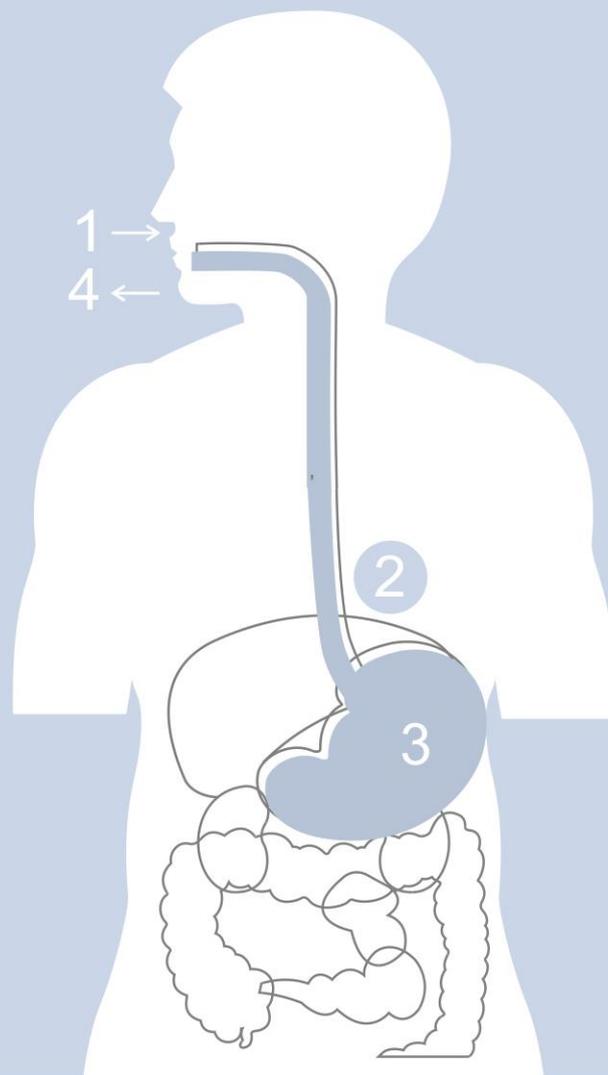

RESULTADOS CLINICOS

Objetivo:

Evaluar la efectividad y respuesta del Balón Gástrico (Lexbal) en el tratamiento de la obesidad leve a moderada.

Medidas:

Estudio observacional descriptivo en el que la muestra está constituida por los 10 pacientes tratados con balón LEXBAL en nuestro medio. Hemos recopilado los resultados del seguimiento de 10 balones intragástricos (BalonLexbal) en pacientes obesos con obesidad leve a moderada tipo I- II (IMC entre 28 y 34,9 kg/m²) colocados en 2012 y 2013 se han conseguido pérdidas superiores al 70 % del exceso de peso . Además se ha observado satisfacción de nuestros pacientes.

Resultados:

Más del 80 % grado de satisfacción de los pacientes 70 % disminución de peso por encima de la media (más de 12 kilos) mejor respuesta en los que presentan adherencia al tratamiento nutricional y no se observaron diferencias en el volumen de llenado del balón.

Conclusiones:

El tratamiento con balón intragástrico, junto con un seguimiento nutricional nos permite reeducar al paciente, y cambiar sus hábitos alimentarios.

El hecho de realizar una dieta gradual, y adaptar cada fase según tolere el paciente, nos ayuda a mejorar la conducta alimentaria y facilita una mayor pérdida de peso El balón intragástrico es una técnica segura, bien tolerada, con escasos efectos adversos y relativamente sencilla en manos habituadas a la práctica endoscópica. Creemos que puede considerarse una terapia coadyuvante eficaz en casos seleccionados de obesidad leve/moderada.

IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO

The logo for MAXIMED features the word "MAXIMED" in a bold, sans-serif font. The letters "M", "A", "X", and "I" are in black, while "M", "E", and "D" are in blue. A stylized blue arrow points from the right side of the "I" towards the "M" on the left.

AGOMEZ@MAXIMED.CL / +56999984094